

PHYTOVEX®

TOUX MIXTE



**SIROP
SANS SUCRE**

DISPOSITIF MÉDICAL

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce dispositif médical. Elle contient des informations importantes relatives à son utilisation. Si vous avez d'autres questions ou un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE PHYTOVEX® SIROP TOUX MIXTE SANS SUCRE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

PHYTOVEX® Sirop Toux mixte sans sucre est un dispositif médical pour **soulager et apaiser la toux** (sèche, grasse, allergique ou irritative) et **le mal de gorge**.

A base d'extraits de plantes et de glycérol, ce sirop forme un **film muco-adhésif persistant** qui favorise l'hydratation de la muqueuse et du mucus facilitant ainsi **l'expectoration physiologique** et **apaise** en cas d'inflammation de la gorge. Sa formule **protège la muqueuse de la gorge** contre les agents irritants.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER PHYTOVEX® SIROP TOUX MIXTE SANS SUCRE ?

Précautions d'emploi

Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 6 ans.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité ou d'allergie à l'un des composants.

Contient du sorbitol qui est une source de fructose, déconseillé chez les patients présentant des problèmes héréditaires rares d'intolérance au fructose.

Grossesse et Allaitement

Il n'y a pas de données cliniques disponibles concernant l'utilisation du produit pendant la grossesse ou l'allaitement, c'est pourquoi son utilisation dans ces circonstances ne peut être recommandée. En cas de doute, consultez votre médecin.

Interactions

Dans le cas d'un traitement médicamenteux concomitant, bien qu'aucune interaction avec les médicaments ne soit connue, il est recommandé de prendre le produit à une heure d'intervalle de la prise de médicaments.

3. COMMENT UTILISER PHYTOVEX® SIROP TOUX MIXTE SANS SUCRE ?

Voie d'administration : Voie orale uniquement.

		FILE : 0668
PRODUCT : NOT PHYTOVEX TXM SIRSSUC 150X210 FRA COUNTRY : FRANCE		Corps Texte : 11 et 12 à 85%
CODE UPSA : 1500644	Code LABOMAR : 7FGL00203300	CATEGORY : NOTICE RECTO
	SIZE : 150 x 210 mm	Date Operator 29/03/22 M.A. (SDWA) 01/04/22 M.A. (SDWA) 14/04/22 M.A. (SDWA) 25/04/22 M.A. (SDWA)
1 PANTONE Black	1 PANTONE Black à 50%	2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
		9
		10
WARNING : Proof color may not reflect true Pantone Color. Artworks may not be altered, in any way, without Exclusive Permission from BMS Package Design Dept.		

